

Coussin Microperles courbe



Prix du produit :

54,30 CHF taxe inclu

Description du produit :

Coussin microperles courbe 85 x 18 cm, PU Bleu, complet (cousu)

Adapté pour bébé, enfant et adulte. Au-delà de l'utilisation médicale, douceur et confort dès la maternité. Stabilité et soutien, positionnement latérale, multifonctionnel.

Coussin microperles courbe 120 x 22 cm, PU Bleu, complet (cousu)

Adapté pour bébé, enfant et adulte. Au-delà de l'utilisation médicale, douceur et confort dès la maternité. Stabilité et soutien, positionnement latérale, multifonctionnel.

Coussin microperles courbe 150 x 22 cm, PU Bleu, complet (cousu)

Particulièrement adapté au positionnement



CMS+
Rte de l'Industrie 2
1163 Etoy
Suisse
021 822 24 40

assis (fauteuil, chaise roulante) Il soutient les bras et le corps. Malléables, les microperles peuvent être déplacées pour soutenir là où c'est nécessaire.

Lavage

Les coussins intérieurs remplis de microperles sont lavables à 60°.

Laver uniquement avec la housse en coton (ou dans un sac à linge)! Ne pas surcharger le tambour du lave-linge : le coussin doit pouvoir bouger librement. Des fuites de perles pourraient gravement endommager la machine à laver. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dégâts dus à la perte du matériau de remplissage.

Séchage

Durant le séchage à l'air, il est recommandé de secouer régulièrement le coussin pour permettre un séchage uniforme du matériau de remplissage. Il est possible de sécher le coussin au sèche-linge seulement à la température minimale et en retirant tout de suite le coussin à la fin du programme (le contact prolongé avec le métal chaud du tambour peut provoquer le rétrécissement des microperles).

Les microperles ne doivent pas pénétrer dans les voies respiratoires.



CMS+
Rte de l'Industrie 2
1163 Etoy
Suisse
021 822 24 40

Codes produits :

Référence 05.21.2000.0.PEA