
Coussin Microperles



Prix du produit :

45,20 CHF taxe inclu

Description du produit :

COUSSIN Microperles 30 (05.21.2060.0.PEA)
CHF 43.-

Coussin en microperles, 30 x 15 cm, PU Bleu, complet (cousu)

Pour un micro-positionnement confortable de longue durée

COUSSIN Microperles 40 (05.21.2070.0.PEA)
CHF49.-

Coussin en microperles, 40 x 30 cm, PU Bleu, complet (cousu)

Pour un micro-positionnement confortable de longue durée

COUSSIN Microperles 60 (05.21.2080.0.PEA)
CHF 67.-

Coussin en microperles, 60 x 40 cm, PU Bleu, complet (cousu)



CMS+
Rte de l'Industrie 2
1163 Etoy
Suisse
021 822 24 40

Il se laisse modeler selon les besoins (ex: surélévation du bras en cas d'œdèmes ou un positionnement ergonomique lors d'hémiplégie).

COUSSIN Microperles 90 (05.21.2090.0.PEA)
CHF 75.-

Coussin en microperles, 90 x 60 cm, coton, fermeture éclair.

Volumineux, il offre souplesse et adaptabilité pour le positionnement des membres supérieurs et inférieurs (ex: en cas d'hémiplégie)

Lavage

Les coussins intérieurs remplis de microperles sont lavables à 60°.

Laver uniquement avec la housse en coton (ou dans un sac à linge)! Ne pas surcharger le tambour du lave-linge : le coussin doit pouvoir bouger librement. Des fuites de perles pourraient gravement endommager la machine à laver. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dégâts dus à la perte du matériau de remplissage.

Séchage

Durant le séchage à l'air, il est recommandé de secouer régulièrement le coussin pour permettre un séchage uniforme du matériau de remplissage. Il est possible de sécher le



CMS+
Rte de l'Industrie 2
1163 Etoy
Suisse
021 822 24 40

coussin au sèche-linge seulement à la température minimale et en retirant tout de suite le coussin à la fin du programme (le contact prolongé avec le métal chaud du tambour peut provoquer le rétrécissement des microperles).

Les microperles ne doivent pas pénétrer dans les voies respiratoires.

Codes produits :

Référence 05.21.2060.0.PEA