

## Téléavertisseur bouton d'appel



### Prix du produit :

**59,30 CHF taxe inclu**

### Description du produit :

Téléavertisseur et bouton d'alerte personnel Aplôs

Laisser une personne à mobilité réduite seule dans une pièce peut être source de stress pour l'aidant, même lorsqu'il se trouve sous le même toit. Ce contacteur permet à l'utilisateur d'avertir l'aidant instantanément, à la simple pression d'un bouton. L'aidant peut ainsi se déplacer tranquillement partout dans la maison et être averti dès que l'utilisateur aura besoin d'aide.

L'utilisateur, équipé de sa télécommande contacteur, a simplement à presser l'unique bouton rouge, pour que l'alarme que porte l'aidant se déclenche. Grâce à sa taille, elle se glisse facilement dans une poche ou être accrochée à une ceinture grâce à son clip.

L'alarme bénéficie d'une alerte à 3 fonctions : visuelle (un voyant rouge s'allume), sensorielle (l'appareil vibre) et sonore (grâce à la sonnerie). Cela permet à l'appel malade de contacter l'aidant de manière certaine.

Une lanière est fournie pour permettre à l'utilisateur de porter l'émetteur autour du cou.



CMS+  
Rte de l'Industrie 2  
1163 Etoy  
Suisse  
021 822 24 40

---

### **Fonctionnement :**

L'appareil fonctionne avec 2 piles AAA non fournies. Après avoir allumé l'avertisseur, attendez 5 secondes jusqu'à entendre un "ding-dong". Le bouton ON/OFF se trouve sur le côté gauche de l'alarme.

Il est possible de régler le type et le volume de la sonnerie de l'alarme. Au dos de celle-ci, se trouve deux petits boutons incrustés dans l'appareil, l'un pour le réglage de la sonnerie et l'autre du volume. Appuyez successivement sur le bouton pour faire défiler le volume ou type de sonnerie jusqu'à la bonne.

La portée du téléavertisseur peut atteindre 100 mètres en plein air et 50 à 70 mètres en intérieur.

### **Codes produits :**

Référence 10.05.0020.0.ERG