

**rollz**<sup>®</sup>  
Pour allez plus loin



# Manuel d'utilisation Rollz Motion





## Rollz® International BV – Rollz Motion


© Copyright 2018 Rollz® International BV

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans notification préalable. Rollz International n'est pas responsable pour d'éventuels fautes de fabrication ou imperfections.

Le produit acheté peut présenter des différences par rapport au produit décrit dans le manuel. Les manuels les plus récents peuvent être demandés auprès de Rollz® International BV ou sur [www.rollz.com](http://www.rollz.com).

### Conforme aux normes CE

Ce produit répond aux exigences de la directive UE 93/42/EEG relative aux dispositifs médicaux. Le produit est classé dans la classe I sur base des critères de classification de l'annexe IX de cette directive. Cette déclaration de conformité est éditée sous la responsabilité de Rollz® International BV, sur base de l'annexe VII à cette directive.

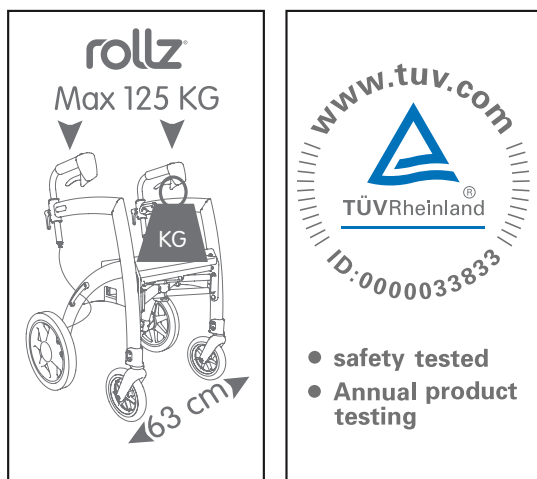

## Contenu

<b>Avant de commencer</b>	<b>4</b>
Information importante	4
Destination	4
Avis de Sécurité	5
Indication	5
Contre-indication	5
Contrôlez si vous avez tout reçu	5
Utilisation deuxième main	6
<b>Utilisation</b>	<b>6</b>
Où se trouvent les éléments?	7
Plier et déplier	8
Réglage et position	9
Utilisation des freins	9
Marcher avec le Rollz Motion	10
Se reposer sur le Rollz Motion	10
Bordures et obstacles	11
Sac	12
Entretien	13
Réglage des freins	13
Lavage / désinfection	14
Changes des pièces	15
Accessoires	15
<b>Transformation du déambulateur en chaise roulante</b>	<b>15</b>
Où se trouvent les éléments	16
Accrocher le kit chaise roulante	17
Ouvrir le kit chaise roulante	18
Dossier kit chaise roulante	20
Ranger le kit chaise roulante	20
Décrocher le kit chaise roulante	20
<b>Fiche technique</b>	<b>21</b>
<b>Contact</b>	<b>21</b>
<b>Garantie</b>	<b>22</b>



## Avant de commencer

Félicitations pour votre Rollz Motion! Ce manuel vous permettra d'utiliser pleinement et en toute sécurité votre Rollz Motion. Nous vous invitons à enregistrer votre Rollz Motion sur: [www.rollz.com](http://www.rollz.com).

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec le Rollz Motion.

## Information importante

- Lisez attentivement ce manuel avant d'employer le déambulateur et rangez le manuel dans un lieu d'où vous pourrez le consulter si nécessaire.
- Ne risquez pas votre sécurité et celle des autres par un mauvais emploi du déambulateur.
- Ce manuel est écrit pour le Rollz Motion.
- Vous trouverez le nr de série et le nr d'article de votre Rollz Motion sur l'étiquette produit qui se trouve sur le siège en dessous du coussin.
- Ce produit est certifié TÜV.
- Lors de réparations, n'utiliser que des pièces de rechange d'origine ou approuvées par Rollz International BV.
- N'utilisez que des accessoires Rollz.
- La garantie n'intervient pas quand le produit est abîmé suite à un surchargement, suite à un pliage ou dépliage inadéquat, l'utilisation de pièces non approuvées par Rollz ou l'utilisation d'accessoires qui ne sont pas d'origine.
- Le Rollz Motion est protégé par un brevet et nom de la marque et du modèle sont également protégés.
- Le Rollz Motion est idéal pour des personnes jusqu'à 125kg et d'une taille de 160cm à 190cm.
- Les pièces du Rollz Motion peuvent légèrement se décolorer au soleil.
- Evitez l'exposition à des températures extrêmes.

## Destination

- Le Rollz Motion est conçu pour le transport/support d'une seule personne.

## Avis de Sécurité

- Tenir le Rollz Motion éloigné de feux ouverts ou autres sources de chaleur, comme feux électriques ou au gaz.
- N'utilisez plus le Rollz Motion au cas où un élément composant est cassé, fissuré ou incomplet.
- Le Rollz Motion a été conçu pour une utilisation simple et facile des différentes fonctions. Toutefois, il est primordial de savoir si l'utilisateur est physiquement capable d'utiliser le déambulateur seul ou si il a besoin de l'aide d'une tierce personne. De plus, Rollz Motion conseille vivement de re-vérifier ceci régulièrement.
- Assurez-vous que toutes les fixations soient bien fixées avant d'utiliser le Rollz Motion.
- Assurez-vous de toujours avoir la bonne position pour les poignées. Vous trouverez plus d'info concernant les bonnes positions au chapitre réglage/position (p.9).
- Ajustez les freins régulièrement pour éviter une perte de prise des freins.

## Indication

Le Rollz Motion sert à offrir un soutien à la marche pour les personnes ayant une mobilité réduite. Ceci tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le siège permet de se reposer lors de promenade plus longue. Le kit chaise roulante Rollz permet de se reposer tout en continuant votre route avec votre entourage.

## Contre-indication

Le Rollz Motion n'est pas conçu pour:

- Des personnes ayant des troubles de perception
- Des personnes ayant de graves problèmes d'équilibre
- Des personnes ayant des problèmes pour s'asseoir

## Contrôlez si vous avez bien tout reçu

Le Rollz Motion est livré prêt à l'emploi. Vérifiez que tous les éléments ont été livrés. Le Rollz Motion est livré avec les éléments suivant:

- 1 sac
- 1 manuel d'utilisation
- 1 coussin
- Kit chaise roulante
- 2 repose pieds
- 2 soutiens pour les bras



## AVERTISSEMENT

Tenir les sacs plastiques de l'emballage en dehors de portée des enfants. Les enfants risquent de le mettre en bouche et de s'étouffer. Il est préférable de jeter l'emballage tout de suite.

## Utilisation deuxième main

- Le Rollz Motion peut être utilisé en deuxième main.
- N'oubliez pas de remettre le manuel d'utilisation au nouvel utilisateur.
- Avant de passer le déambulateur à un autre utilisateur, assurez-vous qu'il ait été lavé, désinfecté et que les pièces le composant aient été contrôlées.

## Utilisation

Le Rollz Motion est livré complet et prêt à l'emploi. Toutefois, il est nécessaire de le régler à vos préférences et taille personnelles. Nous vous invitons à bien lire les différents points ci-dessous avant d'employer votre Rollz Motion pour la première fois. Vous trouverez dans ce chapitre les points suivants:

- Plier et déplier
- Réglage et position
- Utilisation des freins
- Marcher avec le Rollz Motion
- Se reposer avec le Rollz Motion
- Bordures et obstacles
- Sac
- Entretien
- Accessoires

## Où se trouvent les éléments?

Image 1:

- 01. Poignées
- 02. Cadre
- 03. Pneu arrière en mousse dense
- 04. Bouton rouge
- 05. Roue avant mobiles
- 06. Face avant

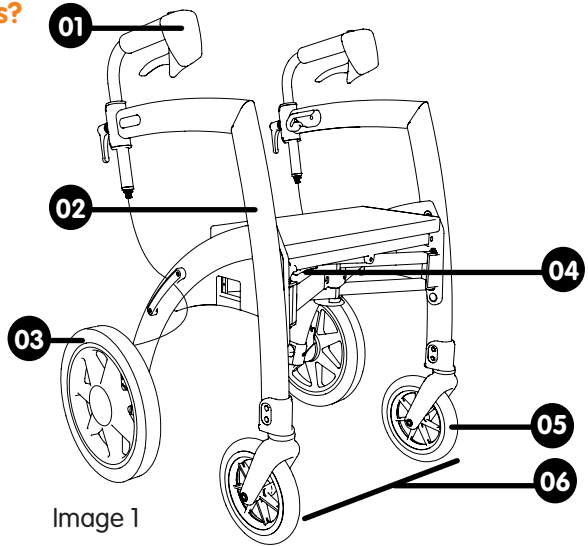


Image 1

Image 2:

- 07. Freins
- 08. Manettes pour ajuster les poignées
- 09. Vis de réglage
- 10. Aide pour bordures
- 11. Freins de blocage
- 12. Repère pour ajuster la hauteur des poignées
- 13. Coussin

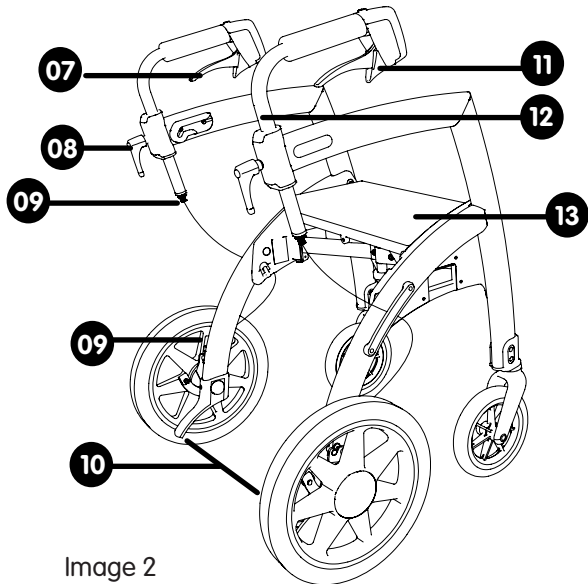


Image 2

## Plier et déplier (Image 3)

### Déplier le Rollz Motion

- Ecarter les côtés du Rollz Motion jusqu'à ce qu'il soit presque tout à fait déplier.
- Pousser le siège vers le bas avec votre main jusqu'à ce que vous entendez un « clic ». Important: le siège n'est bien sécurisé qu'après avoir entendu le « clic ».

### Plier le Rollz Motion

- Appuyez sur le bouton rouge situé en-dessous du siège.
- Comprimez les deux côtés du Rollz Motion jusqu'à ce qu'il soit plié.

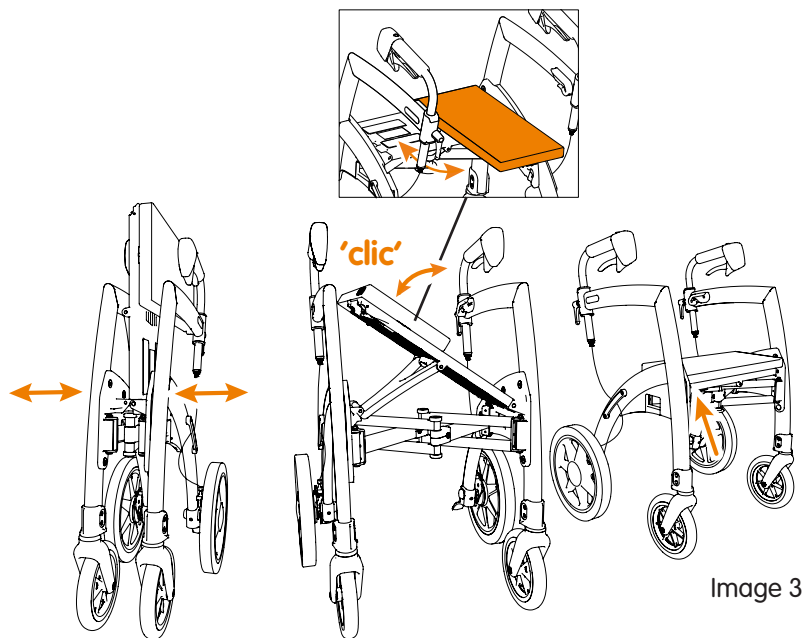


Image 3

**ATTENTION:** Au cas où vous avez utilisé le sac, veillez à ce qu'il soit vide avant de plier le déambulateur.

**ATTENTION:** Assurez-vous que le siège soit bien attaché avant d'employer le Rollz Motion.



## Réglage/position

Nous sommes tous différents et chacun a ses préférences. Le Rollz Motion s'adapte facilement aux désirs de chacun. Pour une utilisation optimale du Rollz Motion, un réglage adéquat est crucial.

- Dévissez les manettes de réglage en sens inverse des aiguilles d'une montre et glissez la poignées à la bonne hauteur pour vous.
- Afin de déterminer la hauteur idéale des poignées pour vous, il vous suffit de prendre place entre les poignées du Rollz Motion avec vos bras tendus vers le bas. Les poignées doivent être réglées à hauteur de vos poignets (Image 4).
- Assurez-vous que les poignées soient droites au-dessus des côtés du Rollz Motion et qu'elles pointent vers l'avant.
- Tournez les manettes de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles soient fixées. Contrôlez que les poignées soient bien fixées et qu'elles ont la bonne position.

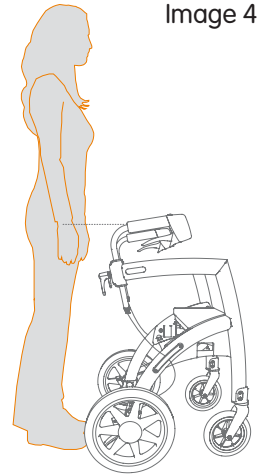


Image 4

**ATTENTION:** Veuillez à toujours régler les deux poignées à hauteur égale afin de préserver une stabilité optimale du Rollz Motion.

## Utilisation des freins

Le Rollz Motion a des freins qui sont souples et faciles à manier. Ces freins permettent d'exercer une force de freinage variable pendant la marche. Il est aussi possible de « bloquer » le Rollz Motion grâce au freins de blocage.

- Serrez les doigts autour des freins pour croître l'intensité du freinage (image 5).
- Serrez les freins de blocage et les freins normaux en même temps, puis lâchez les freins normaux pour bloquer le Rollz Motion (Image 6).
- Pour débloquer le Rollz Motion, il suffit alors d'exercer un pression sur les freins normaux.

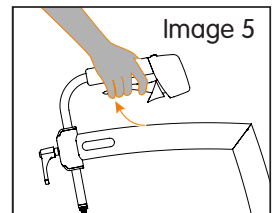


Image 5

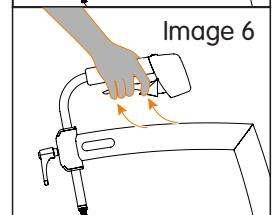


Image 6

## Marcher avec le Rollz Motion

Le concept ergonomique du Rollz Motion vous aide à marcher en vous tenant droit et en toute sécurité. Il vous offre une positions de marche confortable. Afin d'optimiser votre position, il est impératif de bien régler les poignées à votre hauteur idéale.

- a. Veillez à ce que les poignées soient réglées à la bonne hauteur pour vous. Voir le chapitre réglage/position.
- b. Pendant la marche, vous prenez place entre les poignées. Les poignées vous offrent le support pendant la marche.

## Utilisation des Se reposer sur le Rollz Motion

Le Rollz Motion a été conçu pour offrir de l'aide à la marche. De plus, il est possible de se reposer sur le siège du Rollz Motion quand vous désirez faire une pause.

- a. Placez votre Rollz Motion en position "bloqué" (voir: utilisation des freins).
- b. Vous pouvez maintenant vous asseoir sur le siège. Assurez-vous que le Rollz Motion soit toujours bien bloqué quand vous l'employer comme siège. Le Rollz Motion n'est pas conçu pour marcher tant que vous êtes assis sur son siège.

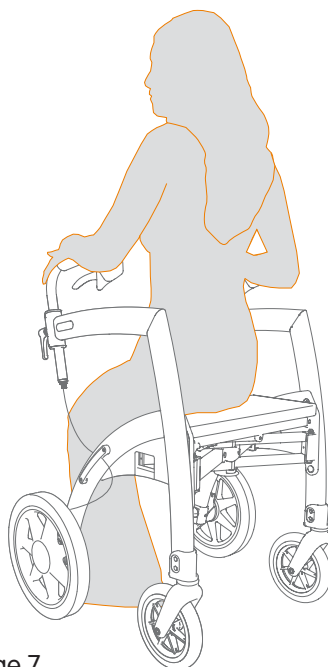


Image 7

## Bordures et obstacles

Les produits de Rollz International sont conçus pour faciliter la vie des utilisateurs. Afin de franchir plus facilement les bordures, Le Rollz

Motion est équipé d'un « aide-bordures ».

- a. Placez le Rollz Motion avec ses roues avant contre la bordure ou obstacle.
- b. Poussez l'aide-bordures vers le bas avec votre pied, tandis que vos mains tirent le Rollz Motion vers l'arrière. Vous verrez que les roues avant vont alors se soulever. Vous pouvez maintenant pousser le Rollz Motion vers l'avant jusqu'à ce que les roues avant aient clairement passé l'obstacle (image 8).
- c. Vous pouvez maintenant baisser les roues avant sur le sol et pousser les roues arrière au-dessus de l'obstacle.

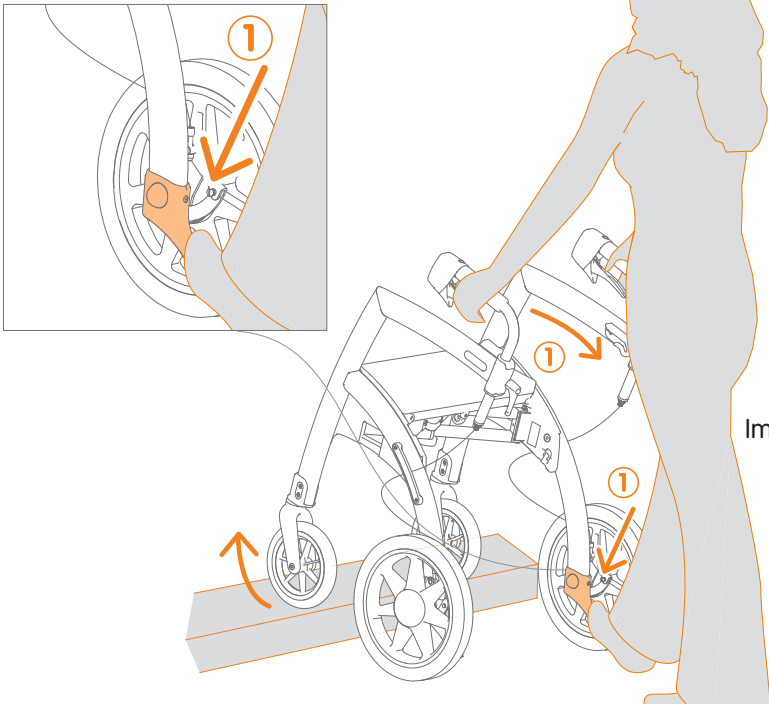


Image 8

## Sac

Grâce au sac vous ne devez pas porter vos affaires vous-même. Le sac se place et s'enlève facilement.

### Placer le sac.

- Tenez le sac sous le siège avec les bandes velcro à l'avant (Fig. 9)
- Attachez les deux boucles de fixation larges autour du cadre et fixez-le au sac avec le Velcro (Fig. 10).
- Appuyez les bandes Velcro des deux côtés du sac contre les bandes Velcro de la plaque latérale en plastique.

### Emploi du sac.

- Le sac est accessible a partir de l'arrière ou par l'avant du Rollz Motion.
- Si le sac est vide, il peut rester attaché lors du repliage du cadre.

### Enlever le sac.

- Tirez les velcro boucles de fixation larges (2x) hors du cadre.
- Tirez les bandes Velcro des deux côtés du sac (2x) de la plaque latérale en plastique.

**ATTENTION:** Le sac peut supporter une charge de 10 kg.  
Ne le surchargez pas.

14. Sac

15. Lanière de fixation large

Image 10


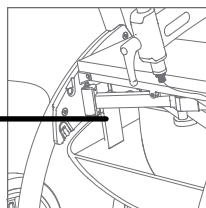


Image 9

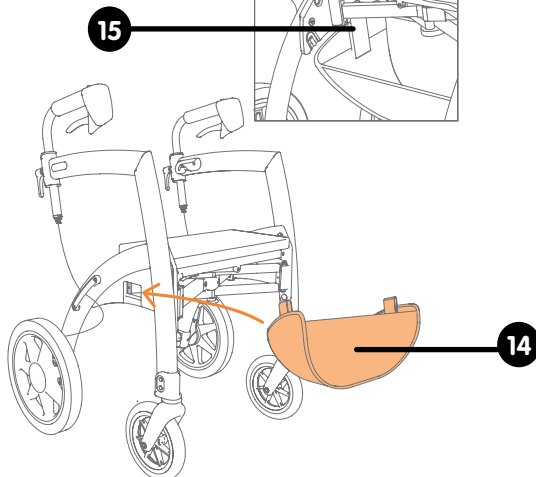

## Entretien

Un entretien régulier allonge la durée de vie et la sécurité de votre Rollz Motion.

### Réglage des freins


Après un certain temps d'usage, il est possible qu'il faille ajuster les freins. Par un réglage correct des freins, vous vous assurez d'un usage optimale des fonctions de freins. Vous pouvez faire cela de deux façons:

#### 1. Réglage des freins du bas (image 11)

- Lorsque vous serrez les freins complètement, le Rollz Motion doit se bloqué complètement. Lorsque vous lâchez complètement les freins, le Rollz Motion doit alors rouler sans aucune résistance.
- En tournant les vis de réglage, vous pouvez ajuster la tension du câble de freins afin d'obtenir les conditions décrites au point a ci-dessus.


#### 2. Réglage des freins du haut (image 12)

- dévisser le boulon de protection. Cela vous permet d'avoir de la place pour plus visser ou pour dévisser le boulon de réglage.
- quand les freins fonctionnent à satisfaction, le boulon de protection peut être resserrer.

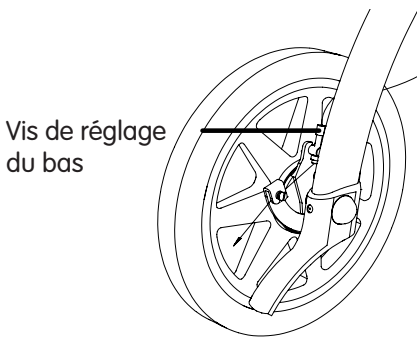

Vis de réglage  
du bas

Image 11

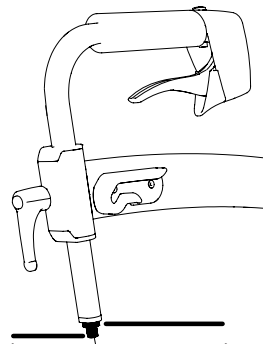

Vis de réglage  
du haut

boulon de  
protection

Image 12

**ATTENTION:** Au cas où les freins ne marche toujours pas correctement après réglage comme défini ci-dessus, veuillez consulter votre fournisseur de votre Rollz Motion et n'employez plus votre Rollz Motion.

## Lavage/désinfection

Afin de préserver le Rollz Motion dans un état optimale, il est indiqué de le laver fréquemment. Lorsque le Rollz Motion change d'utilisateur, il est indiqué de désinfecter le Rollz Motion.

Vous pouvez nettoyer le cadre et les poignées avec de l'eau tiède et un tissu. Vous pouvez enlever les taches tenaces avec un détergent doux. Evitez de mouiller abondamment les éléments du Rollz Motion qui bougent (comme par exemple les charnières et les axes). Bien sécher votre Rollz Motion après le lavage.

Vous pouvez laver les roues avec une brosse synthétique et de l'eau tiède. (Attention: ne pas employer de brosse à metal).

Les tissus couvrant du Rollz Motion sont lavable. Il faut toujours enlever le coussin avant de laver sa housse.

### Enlever les tissus pour les laver.

- Enlever le tissus de siège avec le velcro.
- Ouvrez le siège avec la tirette et enlever le coussin intérieur. La housse peut alors être lavé.

### ATTENTION: ne jamais:

- Laver les tissus à plus de 30°
- Blanchir
- Repasser
- Laver aux produits chimiques
- Mettre dans le séchoir

### Où se trouvent les éléments?

18. Siège - coussin  
19. Bande velcro  
20. Tirette

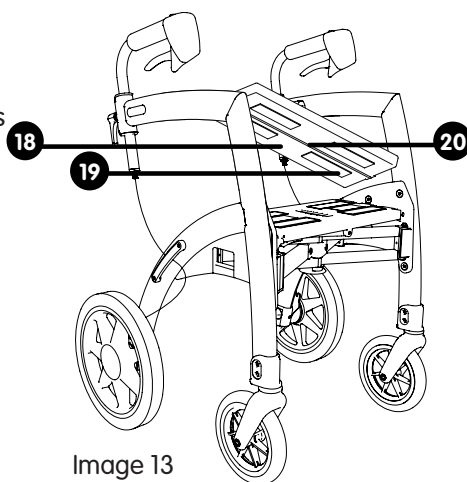


Image 13

### **Replacer les tissus après le lavage.**

- a. Remettre le coussin dans sa housse et refermer la tirette.
- b. Remettre la housse avec le coussin sur le siège et fixer avec la bande velcro.

### **Changer des pièces**

Certaines pièces, comme par exemple les poignées et le siège, peuvent s'user à la longue et doivent être remplacées à temps. Prenez contact avec votre fournisseur pour le remplacement de pièces usées.

**ATTENTION:** N'employez uniquement des pièces d'origine Rollz International ou des pièces approuvées par Rollz International.

### **Accessoires**

Il est possible d'élargir les fonctions du Rollz Motion à l'aide d'accessoires. N'employez uniquement des accessoires d'origine Rollz International ou approuvés par Rollz International. Rollz International développe régulièrement de nouveaux accessoires. Nous vous invitons à consulter notre site web [www.rollz.com](http://www.rollz.com) ou votre fournisseur afin d'être tenu au courant des dernières nouveautés.

### **Transformation du déambulateur en chaise roulante**


Le kit chaise roulante Rollz a été spécialement conçu pour ceux qui désirent pouvoir se reposer en temps voulu pendant la promenade. Le Rollz Motion se transforme en chaise roulante en un tour de main. Et se re-transforme en déambulateur tout aussi vite et facilement.

La fonction chaise roulante est prévue pour une personne. Quand plusieurs personnes prennent place sur la chaise roulante en même temps, cela peut abîmer le Rollz Motion. La chaise roulante est conçue pour une charge maximum de 125 kg.

La fonction chaise roulante est très facile à employer. Le kit chaise roulante peut s'accrocher au déambulateur dès le départ en promenade. Lorsque vous voulez vous reposer, il vous suffit de déplier le kit chaise roulante, de placer les repose-pieds et de retourner les poignées vers l'arrière.

**ATTENTION:** la chaise roulante Rollz n'est pas prévue pour le transport de personnes en taxi-chaise-roulante.

## Inclinaison latérale maximale

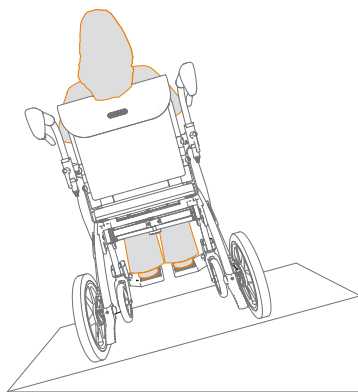

Max  $\approx 15^\circ$

## Où se trouvent les éléments?

- 21. Rails conducteurs du siège
- 22. Levier rouge
- 23. Sac du kit chaise roulante
- 24. Porte-repose-pieds
- 25. Dossier
- 26. soutiens pour les bras
- 27. Rails conducteur sur le cadre
- 28. Repose pieds
- 29. Kit chaise roulante
- 30. Boulons de fixation

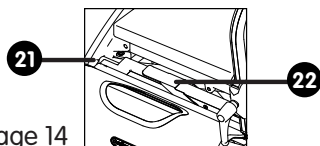


Image 14

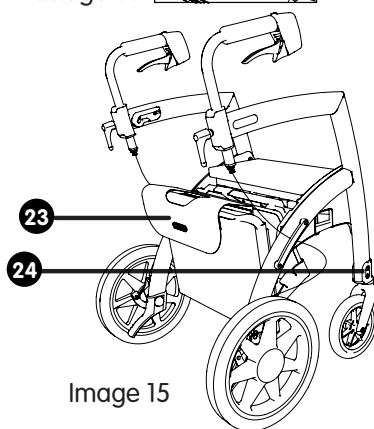


Image 15

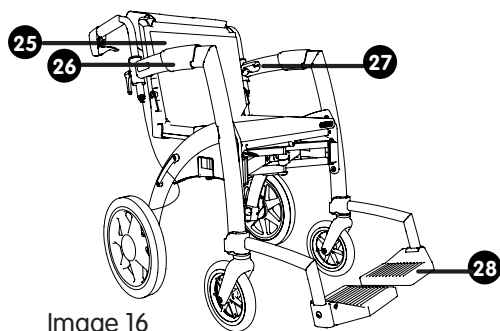


Image 16

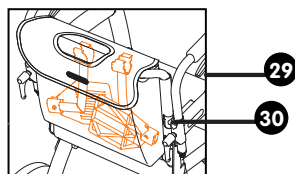


Image 17



## Accrocher le kit chaise roulante

- Prenez le kit chaise roulante et tenez le sac dirigé vers vous (Image 16).
- Soulever avec votre deuxième main le levier rouge vers le haut et placez le kit chaise roulante dans les rails conducteurs du siège (Image 18).
- Poussez le levier rouge doucement vers le bas. Vous pouvez maintenant marcher normalement avec votre déambulateur Rollz Motion (Image 17 et 19).

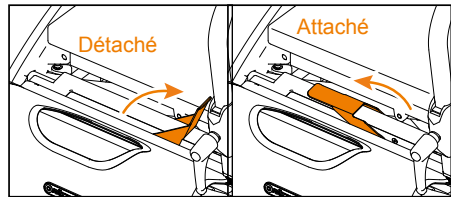


Image 20

Image 21

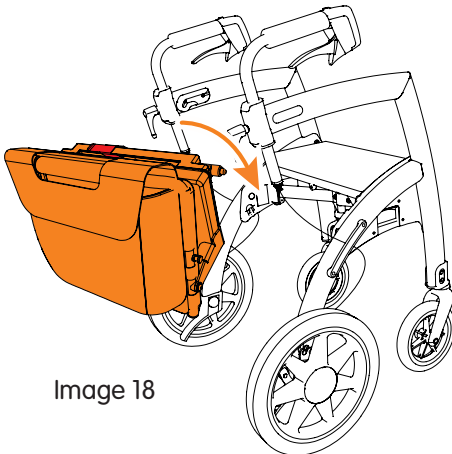


Image 18

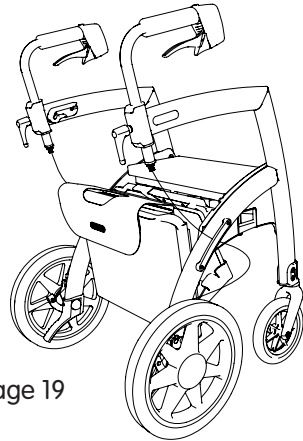


Image 19

**ATTENTION:** Si le levier rouge ne s'abaisse pas facilement et sans forces, il faut alors ressortir le kit chaise roulante de ses rails conducteurs et essayer de le placer à nouveau. N'appliquez pas de forces, cela pourrait abîmer le Rollz Motion. Au cas où vous n'arrivez pas à fixer le kit chaise roulante, même après plusieurs essais, veuillez contacter votre fournisseur.

## Ouvrir le kit chaise roulante

Vous avez fixé le kit chaise roulante à votre Rollz Motion avant votre départ. Quand vous voulez vous reposer, vous déployez le kit chaise roulante et vous le « cliquez » au cadre du Rollz Motion.

- a. Prenez la poignée du kit chaise roulante et tirez le dossier vers le haut et vers l'avant du Rollz Motion (image 21). Après quoi vous tirez le dossier vers l'arrière afin que les boulons d'accrochages viennent se glisser dans les rails conducteurs du cadre (image 22).
- b. Tournez les manettes des poignées du déambulateurs en sens contraire des aiguilles d'une montre et tournez les poignées vers l'arrière. Ajustez les poignées à bonne hauteur pour la personne qui va pousser la chaise roulante et fixez les poignées en vissant les manettes de fixation dans le sens des aiguilles d'une montre (image 23) (voir: réglage/position).
- c. Les repose-pieds se trouvent dans le sac du kit chaise roulante. Vous placez les repose-pieds à l'avant du Rollz Motion dans les porte-repose-pieds en les laissant glisser de haut en bas le long des porte-repose-pieds.
- d. Les repose bras se trouve dans le sac du kit chaise roulante auprès des repose-pieds. Ils se placent à l'endroit où vos bras reposent sur le cadre du déambulateur. Ils se fixent avec la bande velcro (Image 27).

**ATTENTION:** Si les boulons ne glissent pas facilement dans les rails conducteurs du cadre, il faut repousser le dossier vers l'avant et essayer à nouveau de tirer le dossier vers l'arrière en plaçant les boulons dans les rails. Ne forcez pas si ça ne va pas facilement, cela risque d'abîmer le Rollz Motion. Au cas où vous n'arrivez pas à fixer le kit chaise roulante, même après plusieurs essais, veuillez contacter votre fournisseur.

**ATTENTION:** Si les repose-pieds ne glissent pas facilement sur les porte-repose-pieds, il faut les enlever et recommencer. Au cas où cela ne marche pas, mêmes après plusieurs essais, veuillez consulter votre fournisseur.

**ATTENTION:** Avant de s'asseoir dans la chaise roulante, vérifiez que les boulons soient bien fixés dans les rails conducteurs du cadre. Au cas où un des boulons n'est pas bien accroché, il ne faut pas s'asseoir mais d'abord démonter et puis remonter le dossier de la chaise roulante.

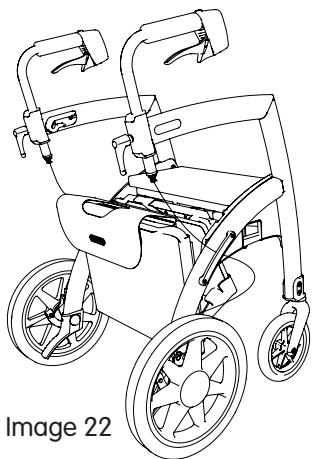


Image 22

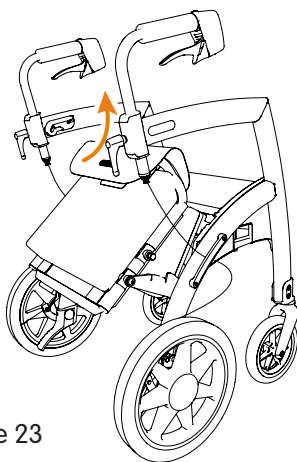


Image 23

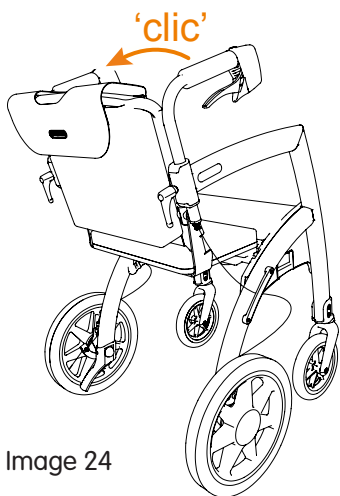


Image 24

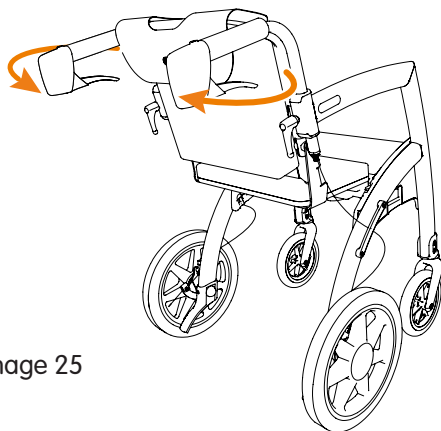


Image 25

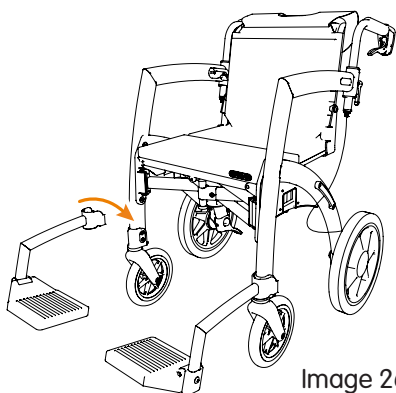


Image 26

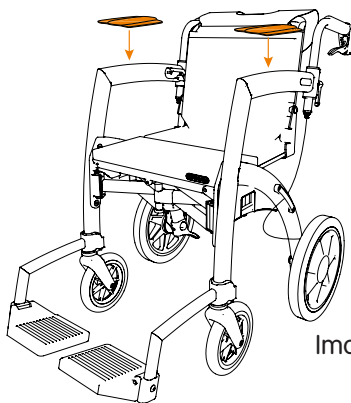


Image 27

## Dossier kit Chaise roulante

Afin d'assurer un confort optimal à l'utilisateur, il est important d'ajuster les bandes de réglage du dossier à l'utilisateur. Lors de votre première utilisation du kit chaise roulante, veuillez procéder aux étapes suivantes:

- a. Sortez les repose-pieds du sac du kit chaise roulante et assurez-vous que le dossier est déplié en mode chaise roulante (voir p.20). Demandez à l'utilisateur de s'asseoir dans la chaise roulante.
- b. Détachez le velcro à l'arrière du dossier du kit chaise roulante en soulevant le sac du kit vers le haut.
- c. Ajustez les bandes en détachant le velcro. Attachez à nouveau les velcro de tel sorte que le bassin de l'utilisateur soit bien droit et son dos soit bien soutenu. Dans la plupart des cas, les bandes du dessous devront être réglées plus souples que les deux bandes du dessus.

## Ranger le kit chaise roulante

- a. Détachez les repose-bras et placez-les dans le sac du kit chaise roulante.
- b. Faites glisser les porte-pieds vers le haut jusqu'à ce qu'ils sortent de leurs porte-repose-pieds. Vous pouvez alors les ranger dans le sac du kit chaise roulante Rollz.
- c. Dévissez les manettes de fixation des poignées en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tournez les poignées vers l'avant jusqu'à ce qu'elles pointent vers l'avant. (Faites attention de tourner les poignées vers l'extérieur afin de ne pas abîmer les câbles de freins). Ajustez les poignées à la bonne hauteur pour vous et fixez à nouveau les manettes de fixation en les vissant dans le sens des aiguilles d'une montre (voir: réglage/position).
- d. Prenez la poignée du kit chaise roulante et poussez le dossier vers l'avant à mi-chemin du cadre. Ensuite vous pouvez tirer le dossier vers l'arrière et vers le bas jusqu'à ce qu'il est de nouveau ranger contre le siège.

Après avoir replié le kit chaise roulante, vous pouvez le laisser là tout en poursuivant votre promenade en marchant avec votre Rollz Motion.

## Décrocher le kit chaise roulante

- a. Tirez sans exercer de force le levier rouge vers le haut.
- b. Prenez le kit par sa poignée et soulevez le kit vers le haut sans forcer.
- c. Repoussez ensuite le levier rouge vers le bas.

## Fiche technique

- Poids maximum de l'utilisateur: 125 kg
- Taille minimum et maximum de l'utilisateur: de 1,60 m à 1,90 m
  
- Poids du produit
  - o Rollz Motion: 10,7 kg
  - o Kit chaise roulante Rollz: 3,7 kg
  
- Dimensions:
  - o Déplié -> Hauteur x Largeur x Longueur: 87-102 x 63 x 65,5 cm
  - o Plié -> Hauteur x Largeur x Longueur: 90-102 x 63 x 31 cm
  - o Largeur de l'assise Chaise roulante Rollz: 45 cm
  - o Profondeur de l'assise de chaise roulante Rollz: 42 cm

## Contact

Dans le soucis de continuellement améliorer nos produits, nous sommes très intéressé de recevoir vos avis, propositions, questions,... à propos du Rollz Motion. Notre adresse email: [info@rollz.com](mailto:info@rollz.com).

Vous pouvez aussi prendre contact avec nous à l'adresse suivante:

Rollz® International BV  
Treubweg 51 bg  
1112 BA Diemen  
Les Pays-Bas

T +31 20 362 20 10

Email: [info@rollz.com](mailto:info@rollz.com)  
[www.rollz.com](http://www.rollz.com)

## Garantie

Rollz International BV, basé à Diemen (ci-après: "Rollz") donne en tant que fabricant garantie sur le produit Rollz Motion (ci-après: "produit") sous les conditions suivantes:

1. La garantie est valable pour une durée de 24 mois à partir de la date d'achat. La garantie n'est jamais prolongée, même pas suite à des réparations. En outre, Rollz International offre au premier propriétaire une garantie de 5 ans sur les défauts de matériaux et de construction du cadre Rollz Motion lors d'une utilisation et d'une maintenance normales. Pour les autres pièces, telles que les poignées, les câbles de frein, la charnière, les boutons de réglage, les roues, etc., la période de garantie générale de 24 mois s'applique, à l'exception de l'usure normale.
2. La garantie donne droit à une réparation. Elle ne donne pas droit à un remplacement ou à une reprise du produit.
3. En cas de réparation, le client assure lui-même le transport du produit jusqu'au magasin où il a été acheté (le „fournisseur") et vice-versa. Le fournisseur se chargera de la réparation en consultation avec Rollz.
4. La garantie n'est valable que si vous remettez à Rollz, en outre du produit les éléments suivants: une copie du bon d'achat datée et une description claire du problème.
5. La garantie n'est pas transmissible et ne peut donc être invoqué que par le premier propriétaire.
6. La garantie ne diminue en rien vos droit régi par la loi.

### Dans les cas suivants, la garantie n'intervient pas:

- Au cas où vous avez effectués (ou fait effectuer) des adaptations ou des réparations sans l'autorisation écrite préalable de Rollz.
- Lorsque les défauts sont dû à un mauvais entretien ou un accident et/ou un entretien qui ne correspond pas aux prescriptions de ce manuel.
- Lorsque le numéro de série est abîmé ou enlevé.
- Pour des dommages causés par une usure normale du produit.

### Important.

La durée de la garantie est de 24 mois à dater de la date d'achat. En cas de dommages, vous êtes invité à vous rendre chez votre fournisseur. Vous pouvez enregistrer votre produit online par le lien suivant: [www.rollz.com](http://www.rollz.com). Veuillez toujours noter le numéro de série de votre Rollz Motion.

Ce numéro se trouve sur l'autocollant qui est collé sur le siège en dessous du coussin.

